

# TESTE DE BOWIE E DICK

## TESTE DE BOWIE E DICK

**Tem como objetivo verificar diariamente o perfeito funcionamento das autoclaves a vapor com sistema de pré-vácuo.**

Estes produtos estão em conformidade com a norma EN-ISO 11140

### PACOTE TESTE PRONTO PARA USO

De grande praticidade e facilidade de utilização, constitui-se de um pacote pronto que contém internamente uma folha impressa com tinta indicativa de alta sensibilidade que reage ao ser submetida a um ciclo especial, feito diariamente antes do início dos trabalhos de esterilização.

Verifica com absoluta precisão se o sistema de vedação da autoclave está eficiente, assegurando a formação do vácuo, que antecipa e dá qualidade à penetração do vapor, detectando bolhas de ar residual e gases não condensáveis, bem como o tempo e a temperatura conforme os parâmetros críticos estabelecidos.

Sua utilização confere segurança e padrão de excelência à CME.



PACOTE TESTE PRONTO

LOT XXXXXX YYYYMM		Medstéril	
AUTOCLAVE			
CICLO		DATA	
[Central graphic area]			
RESULTADO		APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO <input type="checkbox"/>	
OPERADOR		SUPERVISOR	

LOT XXXXXX YYYYMM		Medstéril	
AUTOCLAVE			
CICLO		DATA	
[Central graphic area]			
RESULTADO		APROVADO <input type="checkbox"/> REPROVADO <input type="checkbox"/>	
OPERADOR		SUPERVISOR	

FOLHA REAGENTE INTERNA  
ANTES E APÓS EXPOSIÇÃO SATISFATÓRIA  
PRODUTO LIVRE DE CHUMBO



### FOLHA TESTE

Com a mesma finalidade do pacote teste, sua função é acusar prontamente, com absoluta precisão o bom funcionamento da autoclave no início dos trabalhos pela manhã.



Esta folha é introduzida no centro de um pacote padrão com campos cirúrgicos, participando do primeiro ciclo do dia.

Cor original amarela sem exposição



#### EXEMPLOS DE FALHA

Cor não uniforme em partes da folha, indica funcionamento irregular da autoclave que deverá ser averiguada.

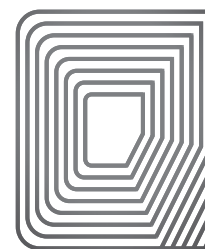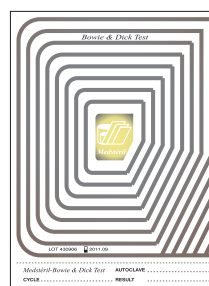

Cor final firme, preta, uniforme, irreversível, indica funcionamento correto da autoclave

