

# INDICADOR QUÍMICO MULTIPARÂMETRO CLASSE 4



Destina-se à monitoração imediata do ciclo de esterilização na autoclave a vapor.

De fácil leitura e rigorosa precisão, detecta falhas no processo como ausência de vapor e/ou temperatura muito baixa, monitorando assim todos os parâmetros críticos estabelecidos.

Ecologicamente correto, atóxico e seguro, é fabricado conforme padrão internacional de qualidade ISO (International Organization for Standardization).

Recomenda-se colocar uma tira dentro de cada pacote ou junto ao material a ser processado, certificando-se assim que o agente esterilizante penetrou no pacote efetuando corretamente a esterilização.


A cor inicial marrom muda para preto após o processo, devendo estar firme e uniforme.

Mantém-se desta forma indefinidamente, podendo ser arquivada como prova do sucesso do ciclo.


Seu uso contínuo proporciona segurança e praticidade aos profissionais, conferindo um padrão de excelência à C.M.E.

## GUIA DE RESULTADOS

ORIGINAL - Não exposto

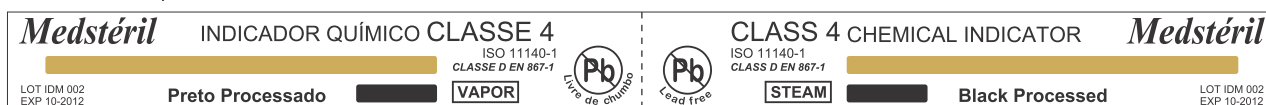

INCORRETO - Sem presença de vapor

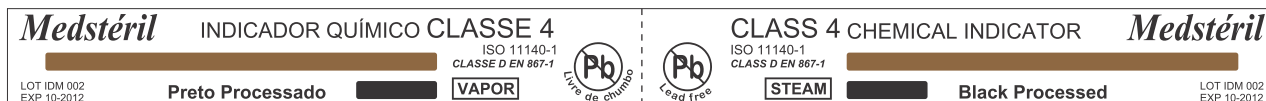

CORRETO - Após a exposição



**Atende aos valores de:**

121C (20 minutos) ou  
134C (3,5 minutos)

**Apresentação:**

Caixa com 240 tiras

**Classificação:**

EN - ISO 11.140-1