

INDICADOR QUÍMICO INTEGRADOR TIPO 5



Destina-se à monitoração imediata do ciclo de esterilização na autoclave a vapor.

Contém tintas reagentes de alta tecnologia e sensibilidade que controlam com exatidão todos os parâmetros críticos estabelecidos de tempo, vapor e temperatura.

Sua precisão é rigorosa, correspondendo à curva de morte do *Geobacillus stearothermophilus*, proporcionando segurança e confiança total ao profissional da C.M.E. Ecologicamente correto, atóxico e seguro, é fabricado conforme padrão internacional de qualidade ISO (International Organization for Standardization).

Recomenda-se colocar uma tira em cada pacote ou caixa cirúrgica oferecendo prova de controle ao centro cirúrgico podendo ser anotado na tira dados do ciclo e/ou paciente.

Sua cor inicial muda para preto/verde escuro uniforme após o processo e **não altera com o tempo**, devendo ser arquivada como prova legal do ciclo efetivado com sucesso.

Seu uso contínuo confere padrão de excelência à C.M.E.

Atende aos valores de:

121°C (16,5 minutos)
128°C (9 minutos)
134°C (3,5 minutos)

Classificação:


EN - ISO 11.140-1

Apresentação:

Embalagem com 50,100 e 250 tiras

GUIA DE RESULTADOS

ORIGINAL - Não exposto

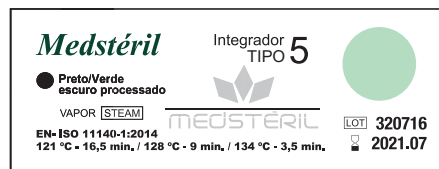

INCORRETO - Tempo e temperatura incorretos.



INCORRETO - Sem presença de vapor - apenas a temperatura



INCORRETO - Excesso de umidade



CORRETO



CORRETO

