

Test Pack Bowie Dick Compact

Guia de comparação de resultados


Pacote teste descartável para autoclave

Teste de penetração de vapor


Ciclo de Bowie Dick

134 °C - 3,5 min ± 5 segundos ou


121 °C - 16,5 min ± 5 segundos

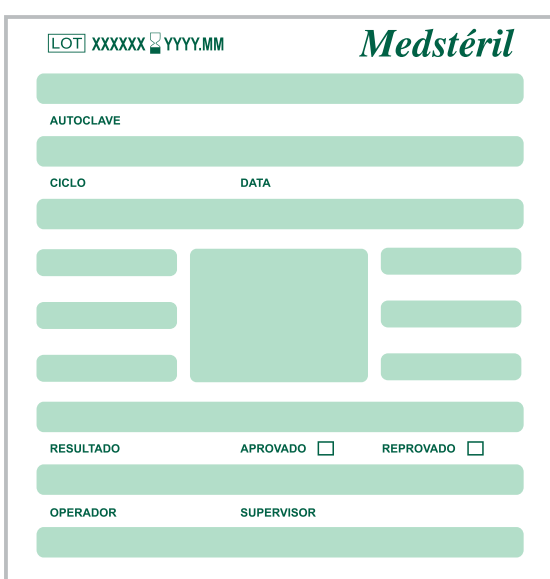


Não Exposto
Cor original verde

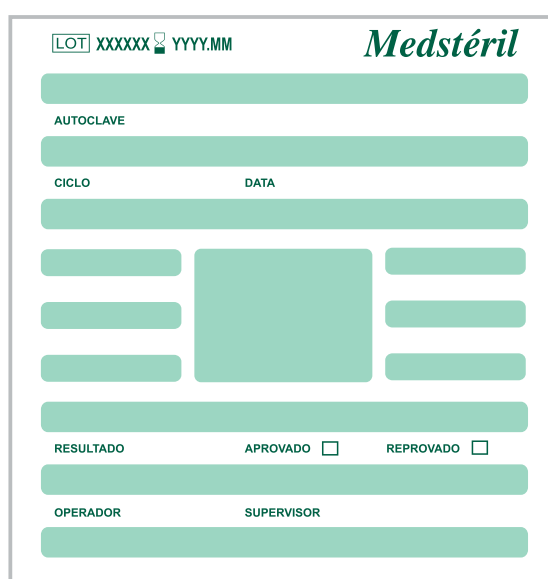


Não Seguro
Sem presença de vapor,
apenas de temperatura

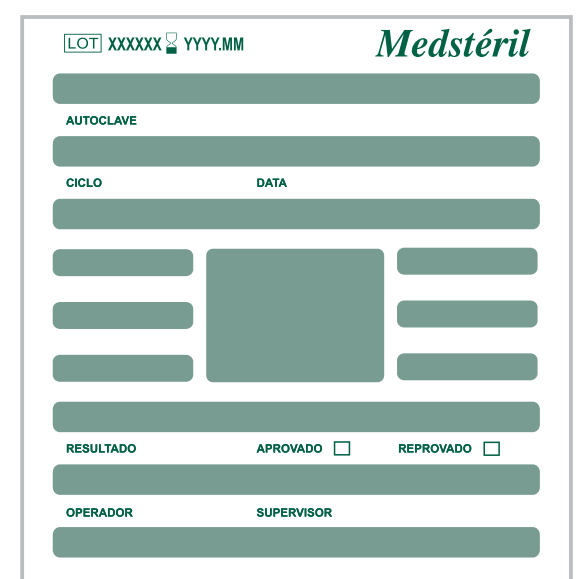


Não Seguro
Penetração insuficiente de vapor

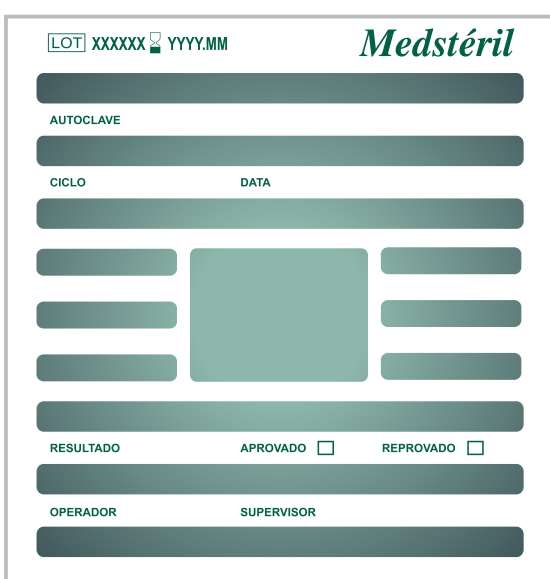

Não Seguro
Presença de gases não condensáveis
ou bolha de ar. Se este mesmo aspecto
apresentar manchas irregulares pretas ou
cinzas, indicam condensação de vapor
supersaturado sobre a folha reativa

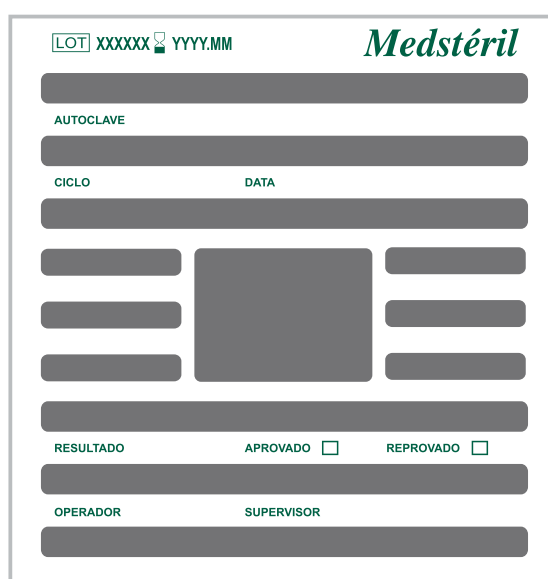

Não Seguro
Presença de vapor superaquecido
A cor preta passa para cinza devido
à temperatura excessiva ou
exposição prolongada

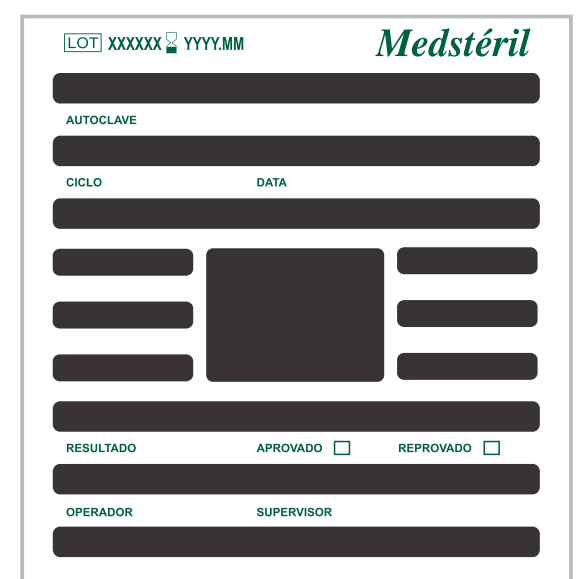

Seguro
A cor final marrom escuro ou
preto uniforme indica o
funcionamento correto da autoclave
com penetração adequada de vapor